

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE SU “SMILE DISTRACTOR”

Al final de su operación, el cirujano implantará un pequeño tornillo de fijación en uno de los lados de su distractor. De esta manera no se moverá.

Una nueva consulta de revisión será necesaria en una semana. El tornillo de fijación será eliminado en ese momento. De esta manera el distractor está listo para usar.

Se proveen cuatro huecos en la parte central del distractor, una por cada cuarto de giro. El distractor se activará dos veces al día con un cuarto de giro, lo que coincide en la apertura de medio milímetro al día.

La clavija de la llave azul está fijada exactamente en la abertura central del distractor, de uno a dos

milímetros de profundidad, gírela ligeramente hacia abajo u hacia atrás, hasta que la llave llegue al final del botón blanco. Su cirujano u ortodontista debe realizar esto por primera vez con un espejo.

De esta manera, podremos, tras 10 días de actividad, esperar una apertura de 5 mm entre los 2 dientes frontales.

Para fijar el ensanchamiento correctamente, USTED debe volver a la consulta una o dos veces. Generalmente esto requiere de una a tres semanas. Una vez se consiga el ensanchamiento deseado, el tornillo de fijación es de nuevo fijado por su médico. A partir de aquí el distractor se convierte en pasivo.

El distractor debe permanecer fijo e inmóvil en la boca de 3 a 5 meses. Es posible que el distractor se suelte ligeramente durante este periodo. Si esto ocurre debe acudir a la consulta para fijarlo nuevamente y tensar de nuevo el tornillo de fijación.

Limpie el distractor diariamente con un cepillo de dientes suave, si es posible infantil.



Situación del paladar tras el tratamiento.



Situación tras el ensanchamiento con el smile distractor.



La ortodoncia puede comenzar directamente tras el

ACTIVACIÓN



Deslice la llave en el hueco central y gírela hacia atrás y hacia abajo hasta que la llave llegue al final del botón blanco.



Gire 1/4 de vuelta hasta que el próximo hueco esté preparado. Haga

Nota: la activación se realiza con una llave expansiva de American Orthodontics-Orthotrends, y se llama llave shilliday. Esta llave es segura para los niños, no permite que se utilice incorrectamente y es un instrumento de confianza para cualquier ortodontista.